



Chalfont Massageliege erhältlich in 7 Farben



Chalfont Massageliege Aufbauanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen tragbaren Massageliege. Ihre neue Liege wurde nach anspruchsvollen Standards und unter Verwendung hochwertiger Komponenten und Materialien gefertigt. Bei ordnungsgemäÙer Verwendung und Pflege, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, sollte Ihre Liege jahrelang zuverlässig funktionieren. Um die sichere und korrekte Verwendung Ihres Tisches zu gewährleisten, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um diese Anleitung vor der Verwendung Ihres Tisches vollständig zu lesen.


Öffnen des Tisches

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1. Stellen Sie den Tisch auf seine GummifüÙe, die Griffe sollten nach oben zeigen.</p> | <p>2. Lösen Sie die Tischklammern, öffnen Sie den Tisch teilweise und entfernen Sie das Zubehör (Kopfstütze, Armlehnenablage und zwei seitliche Armlehnen).</p> | <p>3. Klappen Sie alle vier Beine des Tisches vollständig aus.</p> |
|---|---|--|



Aufstellen des Tisches

Während der Tisch auf der Seite liegt, fassen Sie beide Griffe und stellen Sie einen Fuß über die Kante eines der unteren Beine, um zu verhindern, dass der Tisch verrutscht oder zusammenklappt. Ziehen Sie den Tisch zu sich heran, bis der Tisch nach oben gekippt ist. Sobald der Tisch steht, vergewissern Sie sich, dass die Tischplatte flach ist und die Beine vollständig ausgezogen sind. Wenn der Tisch in der Mitte spitz zuläuft, überprüfen Sie die Kabel und richten Sie sie aus.

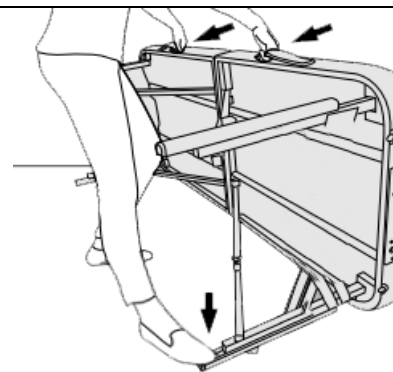

Höhenanpassung

Die richtige Tischhöhe hängt von der Körpergröße des Therapeuten, der Behandlungsart und der Technik ab. Sie können die Höhe einstellen, indem Sie den Griffknopf an jedem Bein entfernen. Bringen Sie die Knöpfe wieder an, nachdem Sie jedes Bein auf die gewünschte Position eingestellt haben. Stellen Sie sicher, dass alle Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sind.



Verwendung von Tisch und Zubehör

<p style="text-align: center;">Abnehmbare Kopfstütze</p> <p>Die verstellbare Kopfstütze ermöglicht es Ihnen, den Winkel und die Höhe der Basis durch Verstellen des Basisgriffs zu ändern.</p>	<p style="text-align: center;">Vordere Armlehnenablage</p> <p>Diese verstellbare Armlehnenablage ist eine gute Vorrichtung, um die Arme Ihres Kunden an der Vorderseite des Tisches zu stützen. Hängen Sie die Armlehnenablage an die beiden Stangen der Kopfstütze und schieben Sie den Gurt nach oben oder unten, um die optimale Position zu erreichen.</p>	<p style="text-align: center;">Zweiseitige Armstütze</p> <p>Dies ist ein alternatives Zubehör für die Armlehnen, das die gleiche Funktion wie die Armlehnenablage hat. Die Seitenarme erhöhen die Tischbreite. Sie passen in die erforderlichen Zubehöraussparungen auf jeder Seite des Tisches.</p>
		
<p style="text-align: center;">Atemloch</p> <p>Durch die Verwendung des Atemlochs (anstelle der Kopfstütze) können Sie die Gesichtsposition des Klienten ändern, so dass Sie an verschiedenen Körperteilen arbeiten können.</p>	<p style="text-align: center;">Verstellbare Rückenlehne</p> <p>Der Chalfont-Tisch verfügt über eine verstellbare Rückenlehne, die je nach Bedarf in 10 verschiedenen Positionen arretiert werden kann. Hinweis: Diese Option ist nur bei der 3-teiligen Ausführung der Tische verfügbar.</p>	<p style="text-align: center;">Reiki-Endplatte</p> <p>Beide Enden der Liege sind bogenförmig gestaltet, so dass Sie sich bequem auf einen Hocker setzen und Ihre Beine unter die Liege schieben können, während Sie eine Reiki-Massage durchführen. Hinweis: Passen Sie die Höhe der Liege an, wenn Sie mehr Platz benötigen.</p>
		

Gewichtsbeschränkungen des Tisches

Wenn Sie den Klienten in der Mitte der Liege positionieren, wird das Gewicht gleichmäßig verteilt und die Stabilität gewährleistet. Setzen Sie sich zunächst vorsichtig in die Nähe der Tischmitte (nicht darauf) und dann so nah wie möglich an die Mitte (vom Rand aus). Das Arbeitsgewicht ist die Kombination aus dem Gewicht des Klienten und dem maximalen Druck, der vom Therapeuten nach unten ausgeübt wird. Beispiel: Bei einem Klienten mit einem Gewicht von 250 Pfund beträgt das maximale Arbeitsgewicht für die Liege 600 Pfund, der maximale Druck nach unten, der sicher ausgeübt werden kann, beträgt 350 Pfund, da der seitlich ausgeübte Druck die Liege wesentlich stärker belastet, sollte der maximale seitliche Druck 50 % des maximalen Drucks nach unten nicht überschreiten.

Hinweis: Überschreiten Sie nicht das angegebene maximale Arbeitsgewicht (Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen und/oder Schäden kommen).

Lagerung

Befestigen Sie die Kopfstützenbasis und das Gesichtspolster wie abgebildet am Gummiband unter dem Tisch und bringen Sie alle Zubehörteile in ihre ursprüngliche Position.

Verwenden Sie die Tragetasche, wenn Sie die Liege transportieren oder lagern, um die Liege vor Beschädigungen zu schützen.

Lagern Sie die Liege bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Setzen Sie den Tisch keinen extremen (heißen oder kalten) Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.



Tischpflege

Pflege des Polstermaterials

Hinweis: Schützen Sie Ihren Tisch vor extremer Kälte oder Hitze, da dies die Polsterung beschädigen kann. Bewahren Sie den Tisch nicht in einem Fahrzeug auf, da er dadurch starken Temperaturschwankungen ausgesetzt werden könnte. Am besten transportieren und lagern Sie den Tisch in einer Tragetasche, um die Polsterung zu schützen und zu erhalten.

Tägliche Reinigung: Reinigen Sie den Tisch täglich mit einer milden Seifenlösung und warmem Wasser, und trocknen Sie ihn mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Desinfizieren: Desinfizieren Sie den Tisch bei Bedarf mit einem für PU-Leder zugelassenen Desinfektionsreiniger.

Flecken entfernen: Einige kleinere Flecken können mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel entfernt werden. Besprühen Sie ein feuchtes Tuch mit dem Reiniger und wischen Sie den Fleck vorsichtig ab. Spülen Sie den Fleck gründlich mit warmem Wasser ab und trocknen Sie ihn mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Bei hartnäckigeren Flecken kann eine professionelle Reinigung erforderlich sein.

Hinweis: Verwenden Sie zur Reinigung des Tisches niemals scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel oder Chemikalien. Dies kann die Polsterung beschädigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Schutzmitteln, da diese das PU-Leder angreifen können.

Pflege des Holzes

Ihre Massageliege ist aus ausgesuchten Harthölzern gefertigt und mit einer Lackierung versehen, die keine besondere Pflege erfordert. Falls gewünscht, können Sie ihn gelegentlich mit einem hochwertigen Holzpflegemittel polieren. Halten Sie die Liege trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit nassen oder feuchten Umgebungen. Sollte der Tisch nass geworden sein, trocknen Sie ihn schnell und gründlich mit einem weichen Tuch.

Vorsorgliche Anweisungen

- (1) Pflegen Sie den Tisch regelmäßig. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile sicher befestigt sind und das Kabel nicht beschädigt oder ausgefranst ist. Stellen Sie sicher, dass der Holzrahmen keine Risse aufweist.
- (2) Überlasten Sie den Tisch nicht über die empfohlene Gewichtsgrenze hinaus. Dies könnte zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.
- (3) Verwenden Sie für die Reinigung des PU-Leders keine Mittel mit hohem Alkoholgehalt. Dies führt zu Schäden am PU-Leder.
- (4) Achten Sie bei der Benutzung des Tisches darauf, dass alle vier Beine auf einer festen, ebenen Fläche und auf gleicher Höhe stehen.